



## UGO – BEINEUTEL UND UGO 2L – 2-LITER-DRAINAGEBEUTEL

### VERWENDUNGSHINWEISE

Ugo Beinbeutel und Ugo 2-Liter-Drainagebeutel sind für die Sammlung, Aufbewahrung und Drainage von Urin.

### UGO – BEINBEUTEL

Der Ugo Beinbeutel kann bis zu 7 Tage an Ihrem Katheter befestigt sein. Alle Beinbeutel sind steril verpackte Beutel und haben ein nadelloses Entnahmeventil. Werden in 10-er Boxen geliefert. Bringen Sie einen benutzten Beinbeutel nie noch einmal an.

#### GEMEINWESEN BEINBEUTEL

- Gewebeunterstützung
- 1 Paar Ugo Fix Beinriemen in jeder Box

| REF.               | Produktbeschreibung: |       |                        |           |
|--------------------|----------------------|-------|------------------------|-----------|
| <b>1C/500/ST/L</b> | <b>Ugo 1C</b>        | 500ml | Kurzer Schlauch (5cm)  | Hebelhahn |
| <b>2C/500/LT/L</b> | <b>Ugo 2C</b>        | 500ml | Langer Schlauch (25cm) | Hebelhahn |
| <b>3C/500/ST/T</b> | <b>Ugo 3C</b>        | 500ml | Kurzer Schlauch (5cm)  | T-Hahn    |
| <b>4C/500/LT/T</b> | <b>Ugo 4C</b>        | 500ml | Langer Schlauch (25cm) | T-Hahn    |
| <b>5C/350/DI/L</b> | <b>Ugo 5C</b>        | 350ml | Direkter Abfluss       | Hebelhahn |
| <b>6C/350/ST/L</b> | <b>Ugo 6C</b>        | 350ml | Kurzer Schlauch (5cm)  | Hebelhahn |
| <b>7C/750/ST/L</b> | <b>Ugo 7C</b>        | 750ml | Kurzer Schlauch (5cm)  | Hebelhahn |
| <b>8C/750/LT/L</b> | <b>Ugo 8C</b>        | 750ml | Langer Schlauch (25cm) | Hebelhahn |

#### SO BEFESTIGEN SIE IHREN UGO BEINBEUTEL AN IHREM KATHETER

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände (wenn ein Pfleger den Beinbeutel für Sie wechselt, muss er/sie nach dem Abtrocknen der Hände ein sauberes Paar Handschuhe anziehen).
- Entfernen Sie Riemen oder Hülle, die Ihren **Ugo** Beinbeutel an Ihrem Bein halten.
- Öffnen Sie die Taschenverpackung für einen neuen **Ugo** Beinbeutel und entfernen Sie die Schutzkappe vom abgestuften Anschluss des Beinbeutels.
- Nehmen Sie den alten Beinbeutel vom Katheter, befestigen Sie sofort den abgestuften Anschluss an dem neuen Beinbeutel und stellen Sie eine ausreichende Abdichtung sicher (der Beinbeutel wird in Schließstellung geliefert).
- Es ist wichtig, dass Sie die Enden des Katheters oder des Beinbeutelanschlusses während des Wechsels nicht berühren (Technik ohne Berühren).
- Die entfernte Schutzkappe des neuen **Ugo** Beinbeutels kann an den abgestuften Anschluss des alten Beinbeutels angefügt werden.
- Verwenden Sie Ihre Beinbeutel-Befestigung und die Stützgeräte und passen Sie sie an, um optimale Drainage und Bequemlichkeit zu gewährleisten. Wenn die den gelieferten Beinbeutelriemen verwenden, führen Sie die Beinriemen durch die Ösen auf dem Beutel und stellen Sie sicher, dass der Silikongriff zum Bein zeigt. Alternativ können Sie die **Ugo Fix**-Hülle für zusätzliche Stütze verwenden. Wenn Sie mehr erfahren möchten, kontaktieren Sie [ugo@optimummedical.co.uk](mailto:ugo@optimummedical.co.uk).
- Entleeren Sie den Urin aus Ihrem alten Beinbeutel in die Toilette und entfernen Sie den Beutel, wie von Ihrer Krankenschwester empfohlen.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.

#### SO ENTLEREEN DIE IHREN UGO BEINBEUTEL

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände (wenn ein Pfleger den Beinbeutel für Sie entleert, muss er/sie nach dem Abtrocknen der Hände ein sauberes Paar Handschuhe anziehen).
- Halten Sie den Ablaufhahn über eine Toilette oder einen passenden Behälter.
- Öffnen Sie den Hahn durch Schieben des T-Hahns oder Drücken des Hebelhahns nach unten.
- Lassen Sie den Beutel vollständig abtropfen und schließen Sie dann den Hahn.
- Trocknen Sie das Ende des weichen Silikonabfluss-Schlauchs, falls notwendig, mit einem sauberen Tuch.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.

### UGO 2L – 2-LITER-DRAINAGEBEUTEL

Alle **Ugo 2-L**-Drainagebeutel sind für Verbindungsdrainage geeignet (lassen sich für zusätzliche Drainage über Nacht an Ihrem Beinbeutel befestigen).

**Ugo 9**, **Ugo 10**, **Ugo 10 Xtra** und **Ugo 11** können nur einmal abgeleitet werden.

**Ugo 9**, **Ugo 10** und **Ugo 10 Xtra** sind nur für Verbindungsdrainage geeignet und können nicht direkt am Katheter angebracht werden. **Ugo 11** ist für Verbindungsdrainage geeignet und kann direkt am Katheter angebracht werden.

**Ugo 12** und **Ugo 13** haben ein nadelloses Entnahmeventil und sind für den direkten Anschluss an einen Katheter für bis zu 7 Tage geeignet.

#### Ugo 2L Drainagebeutel- Direkter Abfluss 90cm

| REF.               | Produktbeschreibung: |                               |                           | Mengen                                    |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| <b>9/NS/SU/DO</b>  | <b>Ugo 9</b>         | Nicht entwässerbar/Reißband   | Nicht steril              | wiederverschließbarer Beutel mit 10 Stück |
| <b>10/NS/SU/DO</b> | <b>Ugo 10</b>        | T-Hahn für den Einmalgebrauch | Nicht steril              | wiederverschließbarer Beutel mit 10 Stück |
| <b>11/S/SU/DO</b>  | <b>Ugo 11</b>        | T-Hahn für den Einmalgebrauch | Sterile Taschenverpackung | Schachtel mit 10 Stück                    |
| <b>12/S/D/L</b>    | <b>Ugo 12</b>        | Hebelhahn                     | Sterile Taschenverpackung | Schachtel mit 10 Stück                    |
| <b>13/S/D/T</b>    | <b>Ugo 13</b>        | T-Hahn                        | Sterile Taschenverpackung | Schachtel mit 10 Stück                    |

#### Ugo Xtra 2L Drainagebeutel- Direkter Abfluss 120cm

| REF.        | Produktbeschreibung: |                               |              | Mengen                                    |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--------------|---|
| <b>3300</b> | <b>Ugo 10 Xtra</b>   | T-Hahn für den Einmalgebrauch | Nicht steril | wiederverschließbarer Beutel mit 28 Stück |

#### SO BEFESTIGEN UND ENTFERNEN DIE IHREN UGO 2-LITER-DRAINAGEBEUTEL ALS TEIL EINES DRAINAGE-VERBINDUNGSSYSTEMS

Wenn Sie zusätzliche Drainage über Nacht benötigen, dann kann der **Ugo 2-L**-Drainagebeutel mit dem weichen Silikonabfluss-Schlauch am Ende Ihres **Ugo** Beinbeutels verbunden werden (dies nennt sich Verbindungsdrainage).

#### SCHLAFENSZEIT - BEFESTIGUNG DES UGO 2-L-DRAINAGEBEUTELS

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände (wenn ein Pfleger dies für Sie macht, muss er/sie nach dem Abtrocknen der Hände ein sauberes Paar Handschuhe anziehen).
- Entfernen Sie Riemen oder Hülle, die Ihren **Ugo** Beinbeutel an Ihrem Bein halten.
- Entfernen Sie die Schutzkappe vom abgestuften Anschluss des **Ugo 2-L**-Drainagebeutels.
- Führen Sie den abgestuften Anschluss des **Ugo 2-L**-Drainagebeutels in den weichen Silikon Schlauch auf dem **Ugo** Beinbeutel ein (stellen Sie eine angemessene Abdichtung sicher).
- Fügen Sie den **Ugo 2-L**-Drainagebeutel in eine Halterung.
- Öffnen Sie den Hebelhahn oder das T-Hahn-Ventil auf Ihrem **Ugo** Beinbeutel, um sofortige und dauerhafte Drainage zu ermöglichen.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.

#### MORGENS - BEFESTIGUNG DES UGO 2-L-DRAINAGEBEUTELS

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände (wenn ein Pfleger dies für Sie macht, muss er/sie nach dem Abtrocknen der Hände ein sauberes Paar Handschuhe anziehen).
- Schließen Sie den Hebelhahn oder T-Hahn auf Ihrem **Ugo** Beinbeutel.
- Trennen Sie den **Ugo 2-L**-Drainagebeutel vom weichen Silikon Schlauch auf dem **Ugo** Beinbeutel.
- Verwenden Sie Ihre Beinbeutel-Befestigung und die Stützgeräte und passen Sie sie an, um optimale Drainage und Bequemlichkeit zu gewährleisten.
- Entleeren Sie den Urin aus dem **Ugo 2-L**-Drainagebeutel in die Toilette und entfernen Sie den Beutel, wie von Ihrer Krankenschwester empfohlen.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.
- Schließen Sie einen benutzten 2-L-Drainagebeutel nie erneut an.



#### ACHTUNG

Nur für den Einmalgebrauch, nach Benutzung entsorgen.

Die erneute Verwendung des Produkts kann Infektionen zur Folge haben.

Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist.

Konsultieren Sie einen Arzt vor Anwendung mit Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen.

Nicht in giftigen, schädlichen oder korrosiven Bedingungen aufbewahren.

5 Jahre Haltbarkeitsdauer.

Bitte beachten Sie, dass die Volumenmarkierungen, die auf die Beutel gedruckt sind, annähernd sind.

Nicht für die genaue Aufzeichnung des Urinabflusses verwenden.

#### Warnhinweise:

Von Kindern fernhalten! Erstickungsgefahr.

Bitte halten Sie Plastiktüten von kleinen Kindern und Babys fern.

EC REP MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
66386 St. Ingbert Germany

